



Medilogic mittaustietojen palautus ja siirto toiseen työasemaan


Siirrä Medilogic tietokanta, tiedosto "Backup.mdb", ja data-kansio tiedostoineen työaseman c:\backup medilogic kansioon.

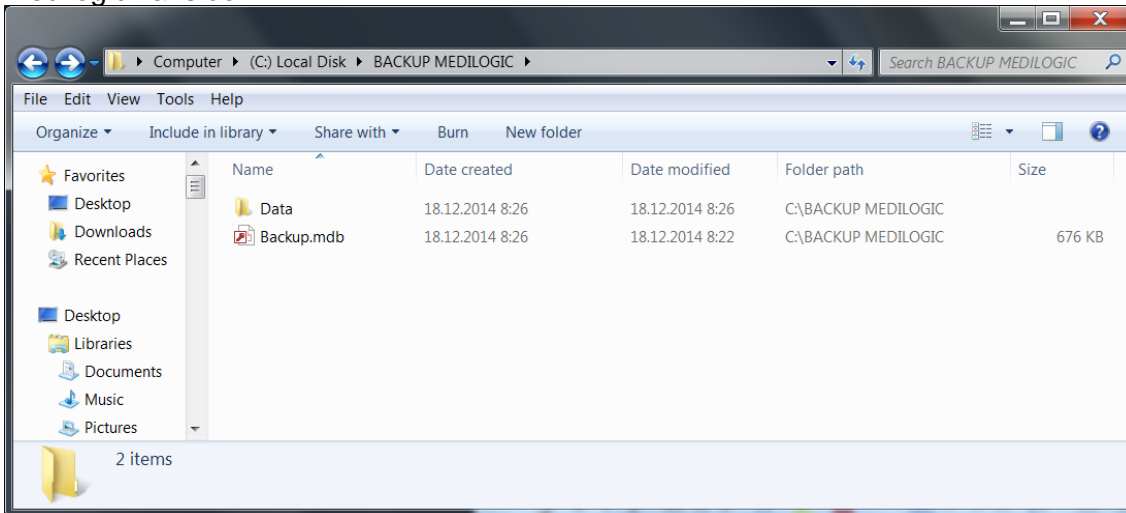


Avaa Medilogic-ohjelma ja valitse "Data"-valikosta "Data administration"

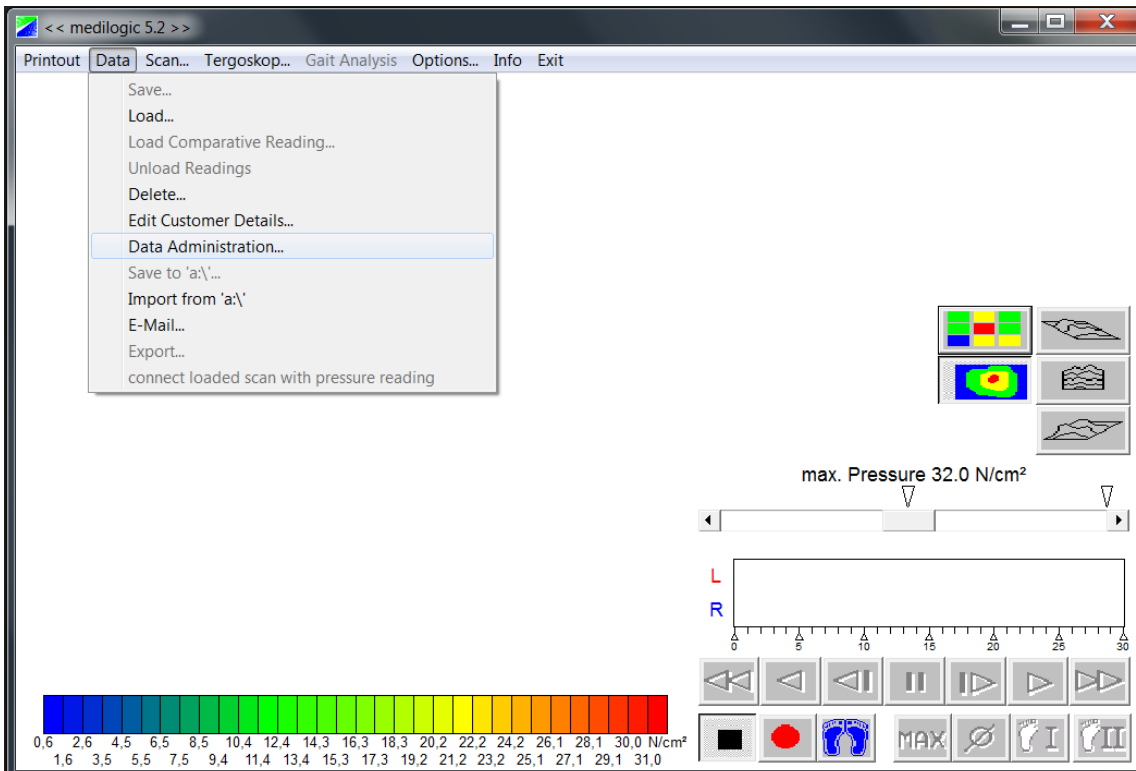

Varmista että ladattavan varmuuskopion talletuskansion ("Restore From") nimi on "c:\Backup Medilogic"

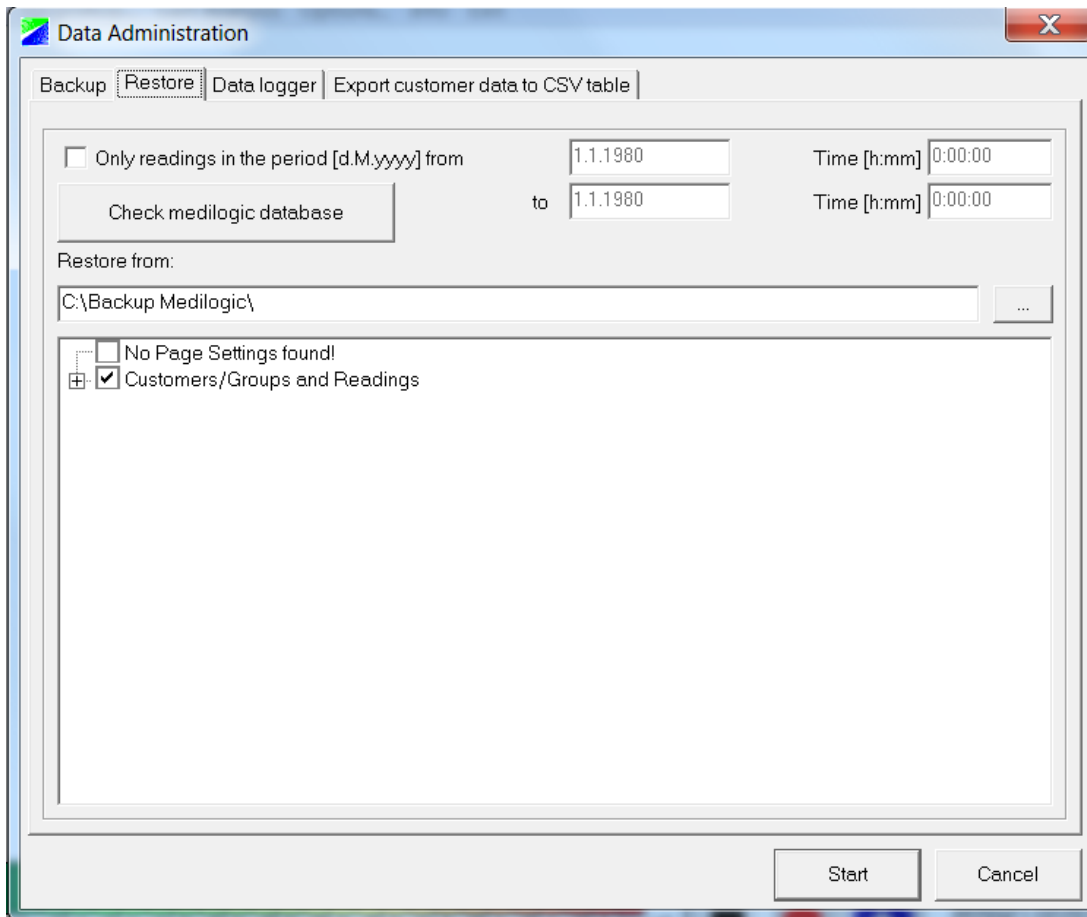


Paina "Start"-nappia aloittaaksesi tietojen tuonnin. "Data Administration" -ikkunan alalaitaan pitäisi tulla ilmoitus "Restore Successful". Jatka painamalla "Exit".

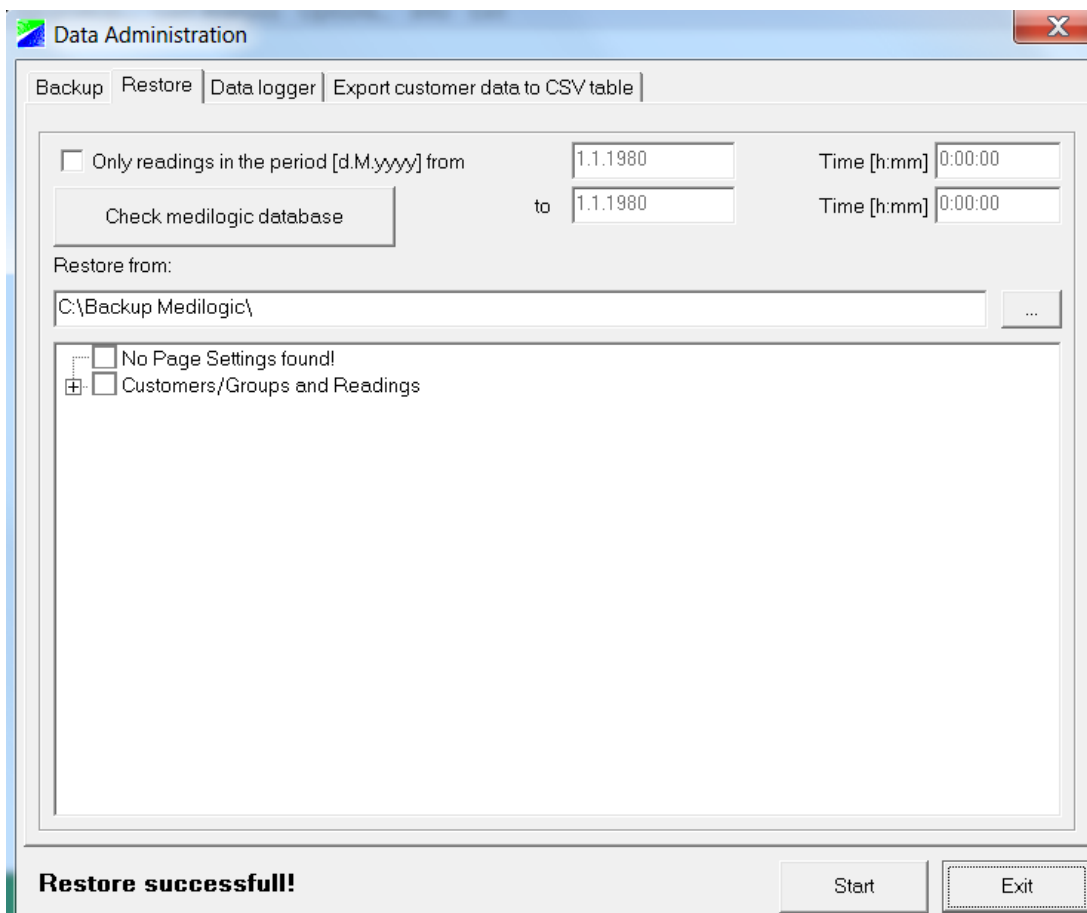


Tietojen lataus käyttöön

Valitse uudestaan "Data"-valikko ja sieltä "Load"-vaihtoehto.

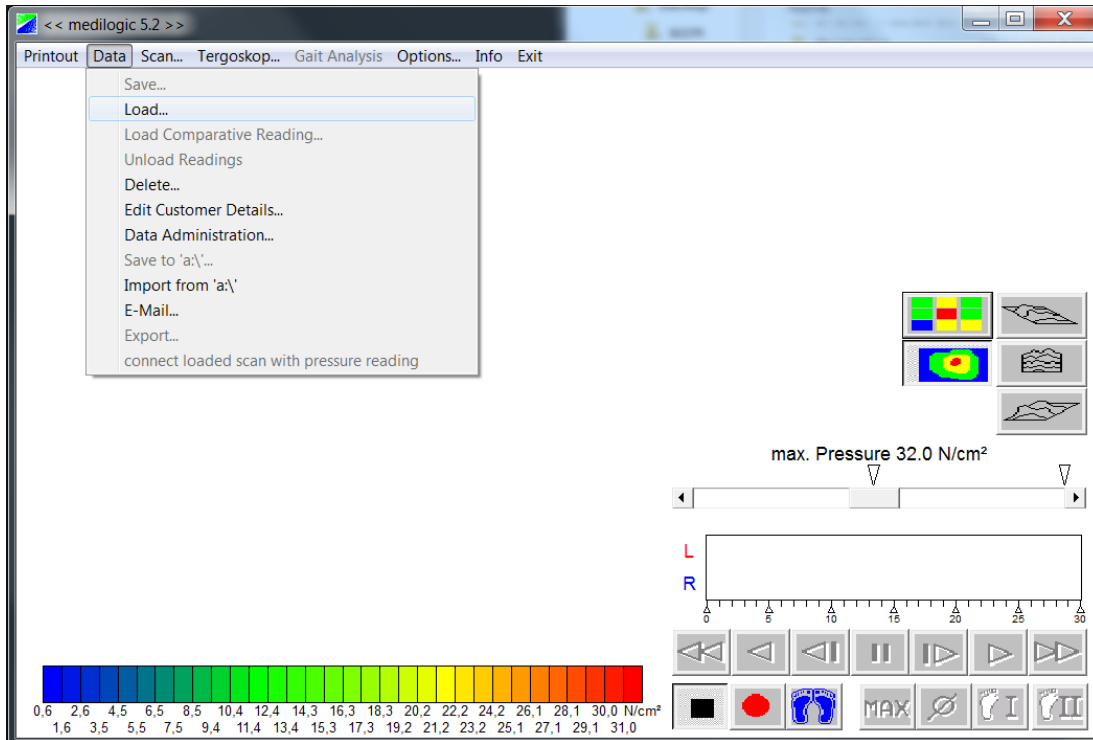

Valitse "Name"-tiputusvalikosta tarvittava mittaustapahtuman nimi

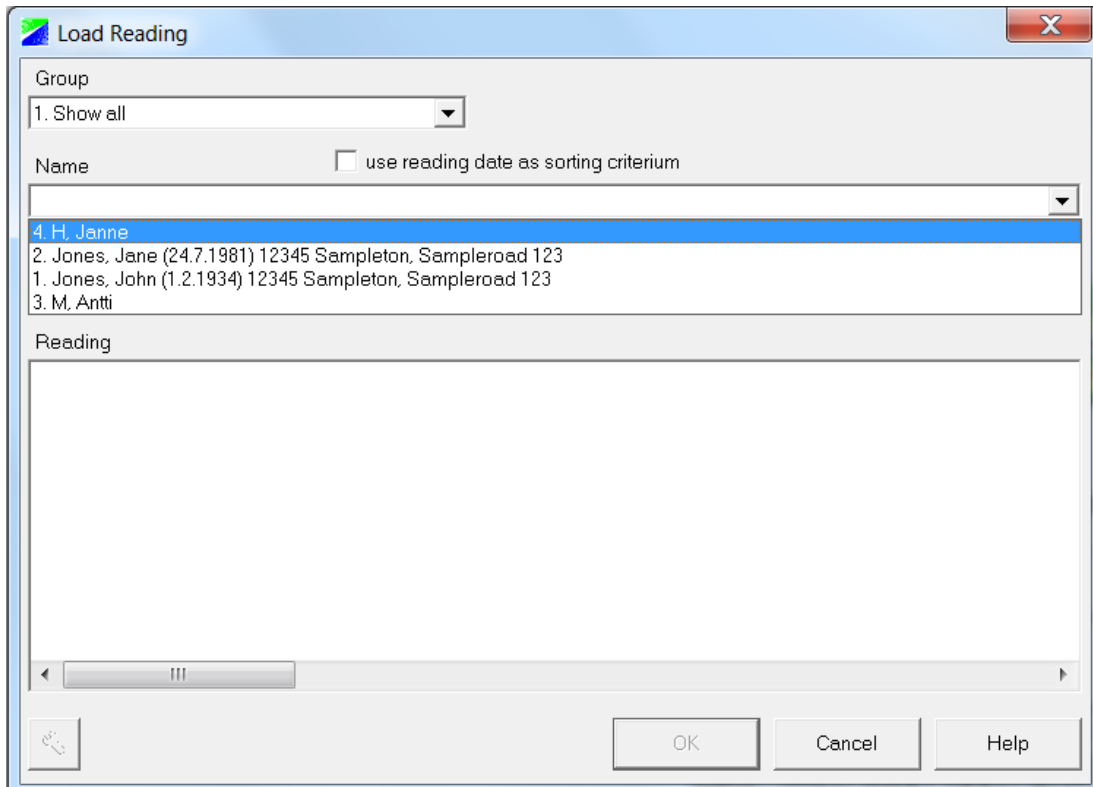

"Reading"-lokeroon tulevat suoritettut mittaukset. Paina "OK"-nappia jotta saat ne käyttöön.

Medilogic käynnistyy uudestaan ja mittaustulokset ovat käytettävissä.

